

DE 1210 - NUVITA Mauelle Milchpumpe

EINFÜHRUNG


Wir gratulieren Ihnen, dass Sie Ihr Baby mit Muttermilch füttern. Die natürliche Muttermilch ist das Beste für die Gesundheit Ihres Babys. Manchmal ist es für Sie unpassend Ihr Kind zu stillen, in diesem Fall können Sie unsere Milchpumpe nutzen und Ihr Kind mit abgepumpter Muttermilch füttern.

Die Milchpumpe hat drei wesentliche Funktionen:

1. Das Silikonkugel-Saugkissen regt die Brust sanft und natürlich an, damit viel Muttermilch produziert wird.
2. Die Milchpumpe simuliert das Saugen eines Babys. Die Simulation erleichtert das Füttern und der Saugprozess ist angenehmer.
3. Das weiche Silikonkugel-Kissen massiert Ihre Brust und vermeidet Schmerzen während der Gewinnung von Milch. Die angenehme Vakuum-Extrusion wurde entwickelt, um mit der Hand erleichtert Milch abzupumpen. Somit ist der Saugprozess gesund und der Prozess wird abgeschlossen.


VERPACKUNGSINHALT

1. Basis.
2. Milchflasche.
3. Flaschen Konverter.
4. Saug-Ventil.
5. Körper.
6. Handgriff.
7. Massage-Kissen.
8. Schutzdeckel.
9. Regulierung für die Saug-Stufen
10. Silikonkugel-Kissen
11. Oberer Deckel
12. Nuckel.
13. Flaschendeckel

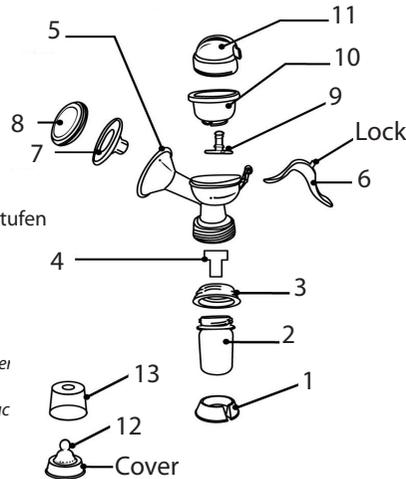

Falls ein oder mehrere Teile fehlen oder beschädigt sind, suchen Sie bitte den Fachhandel auf und verlangen Sie nach einer Erstattung.

FUNKTIONSANLEITUNG

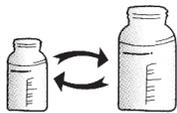


GEEIGNET FÜR VERSCHIEDENE FLASCHEN

Wechselbar zwischen kleinen und großen Flaschen.


SCHUTZDECKEL

Bei nicht Nutzung, decken Sie den Staubschutzdeckel ab, um die Gesundheit Ihres Babys zu sichern.

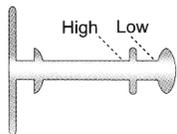

SAUPROZESS REGULIEREN


2 verschiedene Saugstufen. Sie können eine der Stufen (Hoch oder niedrig) für die Milchgewinnung wählen.

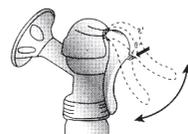

VERRIEGLUNG

Das beliebte Design der Verriegelung ist für die Milchgewinnung gut geeignet und spart viel Platz.

AUFBAUSCHRITTE

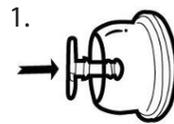

1. Installieren Sie die Regulierung für den Saugprozess



2. Setzen Sie das Silikonkugel-Kissen auf den Körper und stellen Sie sicher, dass das Kissen gut sitzt.




3. Wählen Sie eine Saugstufe (hoch oder gering) und installieren Sie die Verriegelung auf den Körper des Geräts.




4. Befestigen Sie den oberen Deckel.



5. Setzen Sie das Massage-Kissen in den Körper und stellen Sie sicher, dass es gut sitzt

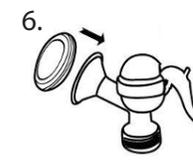


6. Bedecken Sie das Massage-Kissen mit dem Staubschutzdeckel.

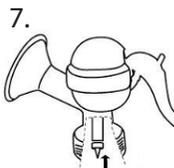

7. Installieren Sie das Ventil fest auf den Stab des Geräts



8. Befestigen Sie eine Milchflasche

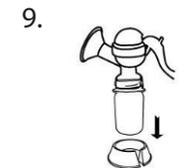


9. Stellen Sie das Produkt auf die Basis

ANWENDUNGSMETHODE


Bevor Sie den Gegenstand benutzen, reinigen Sie alle Teile des Gegenstands mit Seife und warmen Wasser.

1. Öffnen Sie den Staubschutzdeckel und setzen Sie den Nuckel auf das Silikonkugel-Kissen und befestigen Sie die Abschirmung fest auf der Brust
2. Öffnen Sie die Verriegelung.
3. Fangen Sie langsam und vorsichtig mit dem Abpumpen der Milch an. Wenn Sie die gewünschte Intensität und Frequenz erreicht haben, pumpen Sie die Milch bis zum Ende ab.
4. Wenn die Gewinnung der Milch abgeschlossen ist, setzen Sie den Staubschutzdeckel zum Abdecken des Geräts wieder auf das Gerät.

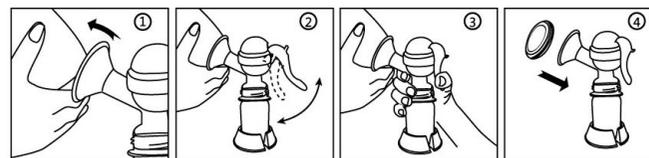


In der Verpackung befinden sich Aufkleber, um die Milchflaschen mit dem Datum des Abpumpens der Milch zu kennzeichnen.


MASSNAHMEN BEI EINEM SAUG-AUSFALL

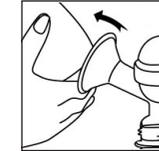

Stellen Sie sicher, dass die Brust-Abschirmung fest auf der Brust sitzt.

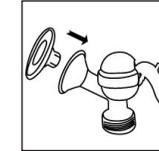

Das Silikonkugel-Kissen und die Brust-Abschirmung müssen fest miteinander verbunden sein.

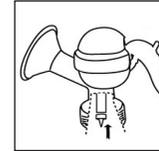

Vergewissern Sie sich, dass das Saugventil fest auf dem Stab befestigt ist.

REINIGEN

Bitte reinigen Sie den Gegenstand vor jeder Benutzung

Bauen Sie alle Teile des Geräts auseinander und reinigen Sie die Teile in einer Geschirrspülmaschine oder mit heißen und seifigen Wasser. Benutzen Sie keine aggressiven oder antibakteriellen Reinigungs- oder Lösungsmittel. Eventuell können Sie die Teile mit einem Dampfsterilisationsgerät sterilisieren.

WARNUNG

1. Benutzen Sie nur das Zubehör, welches zum Verpackungsinhalt gehört. Gewährleisten Sie, dass das Gerät nicht direkten Sonnenlicht oder heißen Quellen ausgesetzt ist.
2. Der Gegenstand ist für einen Personengebrauch entwickelt und sollte nicht mit anderen Personen geteilt werden. Falls Sie das Gerät teilen müssen, gewährleisten Sie, dass jeder seine eignen persönlichen Teile hat, die in Kontakt mit dem Körper und der Milch kommen. (Silikon-Kissen, Flasche etc.).
3. Benutzen Sie den Gegenstand nicht bei Müdigkeit oder ähnlichen Symptomen. Verschieben Sie das Abpumpen der Milch auf einen besseren Zeitpunkt.
4. Stellen Sie sicher, dass jeder fremde Gegenstand mit dem Hauptteil, der Flasche und dem Saugventil übereinstimmt.
5. Bevor Sie den Gegenstand benutzen, muss der Gegenstand gesäubert oder sterilisiert werden.

SERVICE

Mit äußerster Sorgfalt wurde das Produkt produziert. Zu dem Produkt gehört ein Handbuch und weiteres Zubehör, welches zur Verfügung gestellt und mitgeliefert wird. Bei Störungen und Problemen ist es angebracht, den Lösungsvorschlägen des Handbuchs zu folgen. Für weitere Informationen besuchen Sie den Hilfe-Service auf unserer Homepage www.nuvitababy.com

GARANTIE - KUNDENBEDINGUNGEN UND BEDINGUNGEN

In Zustimmung mit laufenden Vorschriften hat das Produkt eine Garantie von 24 Monaten (gesetzliche Garantie). Die Garantie startet am Tag des Kaufdatums auf ihrem Beleg und haftet für Material- oder Produktionsfehler. Ausgeschlossen der gesetzlichen 24 monatigen Garantie sind Verbrauchermaterialien (Bsp. Batterien, Bürstköpfe und Verschleißteile) Die gesetzliche Garantie von 24 Monaten erlischt wenn:

1. Das Produkt unzulässig verändert wurde und dadurch einen ästhetischen Schaden aufweist, der nicht in Einklang mit der Bedienungsanleitung ist.
2. Das Produkt wurde verändert und /oder manipuliert.

3. Die Störungsursache ist durch eine schlechte Behandlung des Gegenstandes entstanden. (Bsp. Oxidation oder die Farbe blättert auf Grund von Wassereinfluss oder anderen Flüssigkeitseinflüssen ab, Schmutz blockiert die Einheiten oder Batterieflüssigkeit läuft aus)

Die folgenden Punkte sind ausgeschlossen von der gesetzlichen 24 onatigen Garantie.

1. Die Kosten beziehen sich auf den Austausch oder auf die Reparatur von Verschleißteilen oder auf eine übliche Erhaltung des Produkts.
2. Die Ausgaben beziehen sich auf den Transport des Produkts zum oder vom Geschäft, wo das Produkt erworben wurde oder von der berechtigten Übergabe Station.
3. Ein Schaden, der das Ergebnis einer nicht zulässigen Installation oder einer unzulässigen Nutzung des Produkts ist, der nicht in Einstimmung mit der Anleitung im Handbuch ist.
4. Schäden durch Naturkatastrophen, Unfälle oder schlechte Bedienungen, die nicht vereinbar mit dem Produkt sind.
5. Nachlässige Fehler, die Auswirkungen auf die Produktleistung haben

Der Hersteller, Händler und alle die am Verkauf beteiligt sind, übernehmen keine Haftung für Verluste oder wirtschaftlichen Schäden aus der Fehlfunktion des Produkts. In Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften müssen der Hersteller, Händler und allen Beteiligten am Verkauf nicht in jedem Fall Schadensersatz übernehmen, einschließlich direkte oder indirekte Schäden, außerplanmäßige Minderungen, Verlust von Ersparnissen und zusätzliche Schäden oder andere Konsequenzen, die nicht die Garantie, Vertrag oder Haftung verletzen.

Missverhalten, die Unfähigkeit das Produkt zu nutzen oder das Vernachlässigen von Papier- und digitalen Dokumenten, einschließlich der Mangel an Service verletzt die Garantie, den Vertrag und die Haftung nicht Das Produkt erfüllt die gesamten europäischen Abwanderungs-Richtlinien der europäischen Kommissions Vereinbarung 2002/72/EC und 2007/19/EC und deren Änderungen über Plastikmaterialien und Artikel, die mit wässrigen und fettigen Lebensmitteln in Kontakt kommen. (PH > 4.5)

Das Produkt entspricht den folgenden Normen und Standards:

EN-1186-3:2002	Materialien in Kontakt mit Lebensmitteln, Plastik, Verpackungsmaterialien, Behältern, Lebensmittelherstellungsprozess, Lebensmitteltechnologie, Lebensmittelprüfungen, chemische Abwanderungen, Schadstoffe, Schadstofffestlegung(Lebensmittel), chemische Analysen und Tests.
EN-1186-2:2002	Materialien in Kontakt mit Lebensmitteln, Plastik, Verpackungsmaterialien, Behältern, Lebensmittelherstellungsprozess, Lebensmitteltechnologie, Lebensmittelprüfungen, Olivenöl, Gemüseöl, chemische Abwanderung, Schadstoffe, chemische Analysen und Tests, Schadstofffestlegung, Fette.