

GR 1210 - NUVITA Χειροκίνητο θηλάστρο


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συγχαρητήρια που θηλάζετε το μωρό σας με μητρικό γάλα, που είναι ότι καλύτερο για την υγεία του μωρού σας. Μερικές φορές όμως ίσως να μην είναι βολικό να θηλάσετε, τότε μπορείτε να επιλέξετε το θηλάστρο μας. Έχει τρία αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά

1. Το ειδικό τζελ σιλικόνης σας διεγείρει απαλά και φυσικά ώστε να παράγεται περισσότερο γάλα.
2. Μιμείται τον τρόπο που ρουφάει το μωρό, κάνοντας τη μητέρα να νιώθει πιο άνετα.
3. Το μαλακό σιλικονένιο μαξιλαράκι κάνει μασάζ στο μαστό σας αποφεύγοντας τον πόνο όταν βγάξετε το γάλα. Η άνετη προεσοχή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι ακριβώς σαν να θηλάζετε με το χέρι σας, κάνοντας την εκμύζηση πιο υγιεινή και ολοκληρωμένη.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. Βάση.
2. Μπουκάλι.
3. Μετατροπέας μπουκαλιού.
4. Βαλβίδα αναρρόφησης.
5. Ράφι σώματος.
6. Χερούλι.
7. Μαξιλαράκι μασάζ.
8. Καπάκι που δεν τραβά τη σκόνη
9. Ρυθμιζόμενος μοχλός αναρρόφησης.
10. Σιλικονένιο τζελ αναρρόφησης.
11. Πάνω καπάκι.
12. Θηλή.
13. Καπάκι μπουκαλιού.

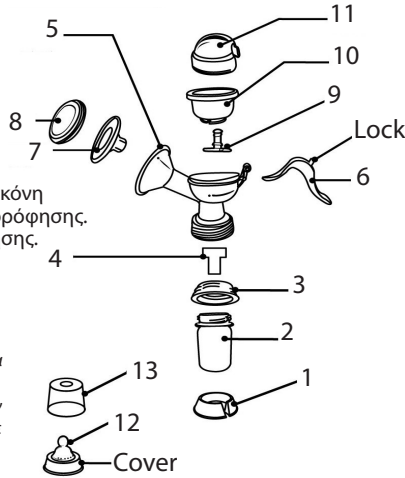


Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα είδη λείπουν ή έχουν υποστεί βλάβη, σας παρακαλούμε απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπό σας και ζητήσετε αντικατάσταση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

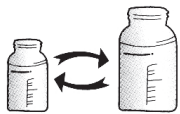


ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ

Για να αλλάξετε μεταξύ μεγάλου και μικρού μπουκαλιού.

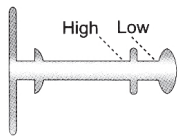


ΡΥΘΙΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Δύο διαφορετικές ρυθμίσεις, για να επιλέξετε αυτόν που σας ταιριάζει καλύτερα.

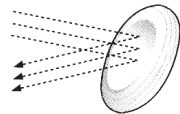

ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΡΑΒΑ ΤΗ ΣΚΟΝΗ.


Παρακαλούμε να σκεπάζετε το καπάκι όταν δεν το χρησιμοποιείτε, για να εξασφαλίζετε την υγεία του μωρού σας.

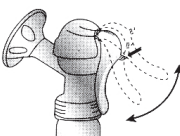

ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ

Ο δημοφιλής σχεδιασμός του τρόπου κλειδώματος εξοικονομεί χώρο και βολεύει στη μεταφορά.

ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

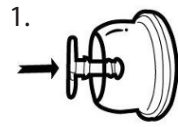

1. Τοποθετείτε τον ρυθμιζόμενο μοχλό αναρρόφησης.



2. Τοποθετείτε το σιλικονένιο τζελ μέσα στο σώμα, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι εφαρμόζει τέλεια και ολοκληρωμένα.




3. Επιλέξτε μία ρύθμιση (Υψηλή ή Χαμηλή) και τοποθετείτε την κλειδαριά μέσα στο σώμα.



4. Τοποθετείτε το πάνω καπάκι.



5. Τοποθετείτε το μαξιλαράκι μασάζ μέσα στο σώμα, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι εφαρμόζει τέλεια και ολοκληρωμένα.

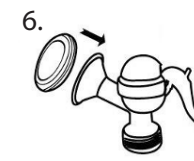

6. Σκεπάστε το με το ειδικό καπάκι.



7. Τοποθετείτε την βαλβίδα σφικτά μέσα στη ράβδο του σώματος.



8. Βάλτε μέσα το μπουκάλι.




9. Βάλτε το προϊόν στη βάση του.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ


Πριν από τη χρήση της συσκευής σας παρακαλούμε να πλύνετε όλα τα εξαρτήματα και τα χέρια σας με ζεστό νερό και σαπούνι.

1. Ανοίξτε το καπάκι, βάλτε τη θηλή μέσα στο σιλικονένιο μαξιλαράκι και εφαρμόστε σφικτά στο στήθος.
2. Ανοίξτε την κλειδαριά.
3. Ξεκινήστε την εξαγωγή αργά και απαλά. Μόλις φτάσετε στην επιθυμητή ένταση και συχνότητα συνεχίστε μέχρι να βγει το γάλα που θέλετε.
4. Όταν ολοκληρώσετε την εξαγωγή, σκεπάστε με το ειδικό καπάκι.

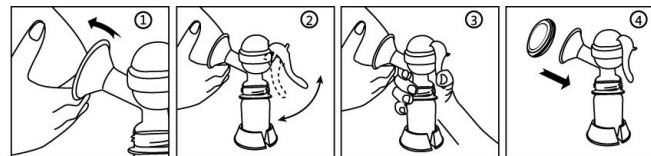


Μέσα στην συσκευασία υπάρχουν ετικέτες για τα μπουκάλια που υποδεικνύουν την ημερομηνία εξαγωγής του γάλακτος.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

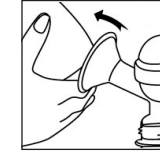

Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα εφαρμόζει σφικτά στο στήθος.

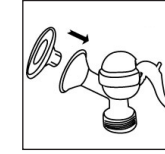

Βεβαιωθείτε ότι το σιλικονένιο μαξιλαράκι και το κάλυμμα είναι σφικτά συνδεδεμένα.

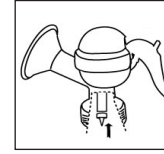

Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα είναι σφικτά συνδεδεμένη με το ειδικό λαστικό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Σας παρακαλούμε να πλένετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Αποσυναρμολογήστε τη συσκευή και πλύνετε όλα τα μέρη της στο πλυντήριο πιάτων ή με ζεστό νερό και σαπούνι, ξεπλένοντας πλήρως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα της συσκευασίας.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν εκτίθεται στον ήλιο ή σε υπερβολική ζέση.
3. Η συσκευή αυτή είναι σχεδιασμένη και αποσκοπεί σε προσωπική χρήση, συνεπώς δεν συνιστάται να τη μοιράζεστε με άλλους. Εάν χρησιμοποιηθεί με άλλους βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν το προσωπικό τους σετ στοιχείων που έρχονται σε επαφή με το σώμα και το γάλα (σιλικονένια βάση, μπουκάλι κτλ).
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κατάσταση λήθαργου ή παρόμοιων συμπτωμάτων αλλά αναβάλετε την εξαγωγή για αργότερα.
5. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο ξένο αντικείμενο μέσα στο κύριο σώμα, στο μπουκάλι ή στη βαλβίδα αναρρόφησης.
6. Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καθαρή ή αποστειρωμένη.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Τα προϊόντα, τα εξαρτήματα και τα έγγραφα που τα συνοδεύουν έχουν σχεδιαστεί με τέτοια φροντίδα έτσι ώστε σε περίπτωση προβλημάτων να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης και να επιλύετε μόνοι σας τυχόν προβλήματα. Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια επισκεφτείτε το www.my-nuvita.com.

ΕΓΓΥΗΣΗ-ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής παρέχει στον καταναλωτή μια νόμιμη εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη.

Εξαιρούνται από την εγγύηση τα "αναλώσιμα" μέρη (πχ μπαταρίες, βουρτσάκια ή μέρη που υπόκεινται σε φθορά).

Η νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών ακυρώνεται εάν:

1. Το προϊόν έχει υποστεί αισθητή βλάβη εξαιτίας λανθασμένης χρήσης που δεν συνάδει με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
 2. Το προϊόν έχει τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί.
 3. Αιτία της αποτυχίας χρήσης ήταν η ανεπαρκής συντήρηση των εξαρτημάτων/των μερών (πχ οξειδωση ή σκουριάσμα λόγω κατακράτησης νερού ή άλλων υγρών, κατακρήνη που μπλοκάρουν τον αισθητήρα, διαρροή υγρού μπαταριών).
- Sono esclusi dalla garanzia legale di 24 mesi:

1. Κόστος αντικατάστασης ή επισκευής μερών που υπόκεινται σε φθορά ή κόστος κανονικής συντήρησης του προϊόντος.
2. Το κόστος και οι κίνδυνοι που περιλαμβάνονται στη μεταφορά του προϊόντος από και προς το κατάστημα όπου αγοράστηκε για την παραλαβή των μερών που καλύπτονται από την εγγύηση.

3. Βλάβη που προκαλείται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του εγχειριδίου.
 4. Βλάβη εξαιτίας φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων ή δυσμενών συνθηκών που δεν είναι συμβατές με το προϊόν.
1. Κόστος αντικατάστασης ή επισκευής μερών που υπόκεινται σε φθορά ή κόστος κανονικής συντήρησης του προϊόντος.
 2. Το κόστος και οι κίνδυνοι που περιλαμβάνονται στη μεταφορά του προϊόντος από και προς το κατάστημα όπου αγοράστηκε για την παραλαβή των μερών που καλύπτονται από την εγγύηση.
 3. Βλάβη που προκαλείται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του εγχειριδίου.
 4. Βλάβη εξαιτίας φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων ή δυσμενών συνθηκών που δεν είναι συμβατές με το προϊόν.
 5. Ελαττώματα που έχουν ασήμαντη επίδραση στην απόδοση του προϊόντος.

Ο κατασκευαστής, ο διανεμητής και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην πώληση δεν φέρουν καμία ευθύνη για απώλειες ή οικονομική ζημία από την δυσλειτουργία του προϊόντος. Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής, ο διανεμητής και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην πώληση δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για βλάβες, συμπεριλαμβανομένων άμεσων ή έμμεσων, απώλεια καθαρών εσόδων ή οικονομικών και άλλων καταστάσεων που παραβιάζουν την εγγύηση, το συμβόλαιο, την αντικειμενική ευθύνη ή άλλους λόγους που προκύπτουν από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης του προϊόντος και των χάρτινων και ηλεκτρονικών εγγράφων, περιλαμβανομένης της έλλειψης υπηρεσιών. Το προϊόν αυτό είναι σύμφωνο με τις συνολικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/72/EC και 2007/19/EC και τις τροπολογίες σχετικά με πλαστικά υλικά και προϊόντα που έρχονται σε επαφή με υδάτινα τρόφιμα (PH > 4.5) και λιπαρά τρόφιμα.

Το προϊόν αυτό είναι συμβατό με τα ακόλουθα πρότυπα:

EN-1186-3:2002 Υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, Πλαστικά, υλικά Πακεταρίσματος, Δοχεία, διαδικασίες κατασκευής τροφίμων, Τεχνολογία τροφίμων, δοκιμές Τροφίμων, Προσμείξεις, Πρόσμειξη καθορισμού (τροφής), Χημική ανάλυση και έλεγχος.

EN-1186-2:2002 Υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, Πλαστικά, υλικά Πακεταρίσματος, Δοχεία, διαδικασίες κατασκευής τροφίμων, Τεχνολογία τροφίμων, δοκιμές Τροφίμων, Ελαιόλαδο, Φυτικά Έλαια, Προσμείξεις, Χημική ανάλυση και έλεγχος, Πρόσμειξη καθορισμού (τροφής), Λιπαρά.