



ES NUVITA 1253 BOLSAS PARA GUARDAR LECHE MATERNA

SIEMPRE CONSULTE A SU DOCTOR ACERCA DE PRÁCTICAS RECOMENDADAS DE ALIMENTACIÓN CON LECHE MATERNA.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Romper el precinto perforado y tirar del precinto de doble cremallera.
- Apretar con cuidado con el pulgar y el índice en las esquinas derecha e izquierda para abrir la bolsa (Nota: la bolsa no se aguantará de pie por sí sola a menos que llegue a su volumen máximo de capacidad).
- Verter la leche en la bolsa.
- Eliminar cualquier exceso de aire de la bolsa moviendo los dedos por encima del nivel de la leche.
- Fijar los precintos de doble cremallera para evitar posibles derramamientos.
- SOLO usar un rotulador permanente de punta fina y suave para cubrir la información necesaria como nombre, fecha, etc.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Asegurarse de que el precinto de doble cremallera está correctamente cerrado.
- Para una mayor estabilidad, se recomienda tumbar la bolsa mientras se mantiene en la nevera o en el congelador.

INSTRUCCIONES DE DESCONGELACIÓN:

- Nunca descongelar la leche en un microondas ni en agua hirviendo.
- Mantener la bolsa bien cerrada, descongelar durante la noche dejándola en la nevera o colocando la bolsa bajo agua caliente.
- Cuando la leche maternal se almacene en una nevera/ congelador, la grasa se separará del resto del líquido, formando una capa en la parte superior. Esto es normal.
- Con la bolsa cerrada, inclinar la bolsa hacia delante y hacia atrás hasta que la leche quede mezclada.
- Verter la leche en un contenedor esterilizado y alimentar al bebé inmediatamente.
- Nunca reutilizar la bolsa de leche maternal. Usar solamente una vez y desechar la bolsa de forma segura lejos del alcance de los niños.