

FR NUVITA 1253 – SAC DE STOCKAGE POUR LE LAIT

TOUJOURS CONSULTER VOTRE DOCTEUR POUR CONNAITRE LES PRATIQUES RECOMMANDÉES POUR L'ALLAITEMENT

MODE D'EMPLOI:

- Déchirez le joint perforé et retirez le joint à double fermetures à glissière.
- Appuyez délicatement avec votre pouce et votre index placés à gauche et à droite des coins de la zone de fermeture éclair pour ouvrir le sac. (Remarque : Le sac ne tient pas debout seul s'il n'a pas atteint sa plus grande capacité de volume).
- Versez le lait extrait dans le sac.
- Retirez tout excès d'air du sac en faisant glisser doucement les doigts vers le haut en partant du niveau de lait.
- Assurez-vous que les joints de la double fermetures à glissière sont bien fermés pour éviter toute fuite possible.
- Utilisez UNIQUEMENT un stylo à encre permanente pour remplir les informations requises telles que : le nom, la date, etc.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE:

- Assurez-vous que le joint à double fermetures à glissière est bien fermé.
- Pour une plus grande stabilité, il est conseillé de conserver le sac au réfrigérateur ou au congélateur.

INSTRUCTIONS DE DÉCONGÉLATION:

- Ne jamais décongeler le lait dans un micro-ondes ou dans de l'eau bouillante.
- Gardez le sac bien fermé, décongelez la nuit dans le réfrigérateur ou en maintenant le sac fermé sous l'eau chaude.
- Lorsque le lait maternel est stocké dans un réfrigérateur /congélateur, la graisse se séparera du reste du liquide formant la couche supérieure et c'est normal.
- Toujours le sac fermé, inclinez doucement le sac vers l'avant jusqu'à ce que le lait se mélange.
- Versez le lait dans un récipient stérile et alimenter immédiatement le bébé.
- Ne réutilisez jamais le sac de stockage pour le lait maternel. Utilisez une seule fois et disposez le sac en toute sécurité hors de portée des enfants.