

IT SACCHETTI PER LATTE MATERNO NUVITA 1253

CONSULTARE SEMPRE IL PROPRIO MEDICO PER CONSIGLI E SUGGERIMENTI SUI METODI CORRETTI DI ALLATTAMENTO AL SENO.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Strappare il sigillo perforato e tirare separatamente il sigillo a doppia chiusura .
- Stringete delicatamente con il pollice e il dito indice agli angoli di sinistra e di destra per aprire la bocca del sacchetto (Nota: il sacchetto non rimane in posizione verticale da solo)
- Versare il latte nel sacchetto.
- Rimuovere l'aria in eccesso dal sacchetto premendolo delicatamente con le dita al di sopra del livello raggiunto dal latte all'interno di esso.
- Chiudere bene i sigilli a doppia chiusura premendo e facendo scorrere le dita avanti e indietro per assicurarsi che il sacchetto risulti perfettamente sigillato.
- Utilizzare un pennarello ad inchiostro indelebile per scrivere sul sacchetto le informazioni richieste, come nome, data ecc.

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO:

- Assicurarsi che il sigillo a doppia chiusura sia chiuso correttamente.
- Porre il sacchetto in posizione piatta all'interno del frigorifero o del congelatore.

ISTRUZIONI PER LO SCONGELAMENTO :

- Non scongelare MAI il latte nel forno a microonde o in acqua bollente.
- Mantenendo il sacchetto sigillato, lasciatelo scongelare durante la notte in frigorifero o mettete il sacchetto ancora sigillato in acqua tiepida.
- Quando il latte materno è conservato in frigorifero / congelatore il latte potrebbe separarsi dalgrasso. Questo è normale.
- Mantenendo il sacchetto sigillato, inclinare delicatamente avanti e indietro fino a quando il latte non si è mescolato.
- Versare il latte in un contenitore sterile quindi darlo immediatamente al bambino.
- Non riutilizzate mai il sacchetto per latte materno. Usare solo una volta e smaltire il sacchetto in modo sicuro fuori dalla portata dei bambini.