

PT SACOS DE ARMAZENAMENTO DE LEITE MATERNO NUVITA 1253

CONSULTE SEMPRE O SEU MÉDICO QUANTO ÀS PRÁTICAS RECOMENDADAS DE AMAMENTAÇÃO.

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO:

- Rasgue o selo de segurança e retire o selo do feixe duplo.
- Suavemente aperte com o seu polegar e indicador colocados nos cantos terminais esquerdo e direito da área de bloqueio por fecho para abrir o saco (Nota: O saco não irá ficar direito por si mesmo até alcançar o volume máximo de capacidade).
- Verta o leite expresso no saco.
- Remova qualquer excesso de ar do saco ao suavemente deslizar os seus dedos por cima do nível de leite existente.
- Prenda os selos do fecho duplo para evitar um possível vazamento.
- APENAS utilize uma caneta de tinta permanente suave para preencher a informação necessário tal como o nome, data, etc.

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

- Certifique-se que o selo de fecho duplo está fechado adequadamente.
- Para uma maior estabilidade, é recomendado colocar o saco no frigorífico ou no congelador.

INSTRUÇÕES DE DESCONGELAMENTO:

- Nunca descongele o leite num micro-ondas ou em água a ferver.
- Mantenha o saco fechado, descongele durante a noite no frigorífico ou ao segurar o saco selado em água quente.
- Quando o leite materno for armazenado no frigorífico/ congelador, a gordura irá separar-se do resto do líquido formando uma camada de topo, sendo isto normal.
- Com o saco selado, suavemente incline o saco para trás e para a frente até que o leite se misture.
- Verta o leite num contentor esterilizado e imediatamente alimente o bebé.
- Nunca reutilize o saco do leite materno. Utilize-o apenas uma vez e livre-se do saco seguramente fora do alcance da criança.