


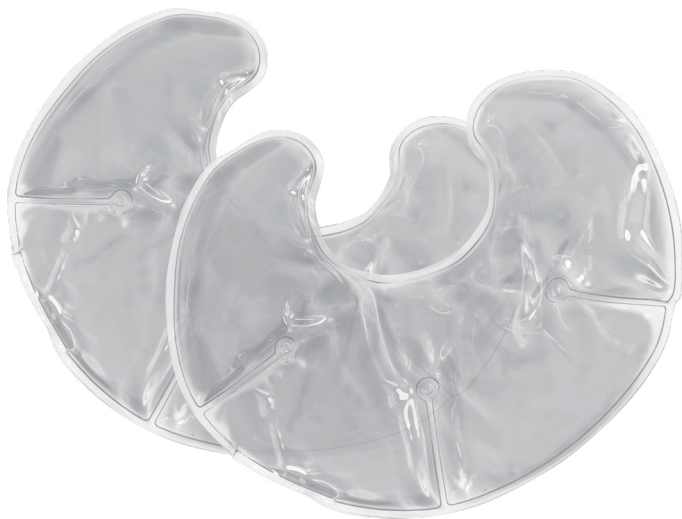

- IT 2 Cuscinetti in Gel Termico per il Seno
- ES 2 Almohadillas Térmicas para el Cuidado del Pecho
- EN 2 Thermal Gel Breast Pads
- FR 2 Coussinets d'Allaitement en Gel Thermique
- DE 2 Thermogel-Stilleinlagen



IT Manuale di Istruzioni

FR Manuel d'Instructions





ES Manual de Instrucciones

DE Bedienungsanleitung

EN Instruction Manual





A

IT USO A CALDO PER STIMOLARE IL FLUSSO DI LATTE PRIMA DELL'ALLATTAMENTO  
 ES USO CALIENTE PARA ESTIMULAR EL FLUJO DE LECHE ANTES DE DAR DE MAMAR  
 EN WARM USE TO STIMULATE THE MILK FLOW BEFORE NURSING  
 FR UTILISATION CHAUDE POUR STIMULER L'AFFLUX DE LAIT AVANT D'ALLAITER  
 DE GEBRAUCH VON WÄRME STIMULIERT DEN MILCHFLUSS VOR DEM STILLEN  
 PT USO QUENTE PARA ESTIMULAR O FLUXO DE LEITE ANTES DA AMAMENTAÇÃO  
 RO UTILIZARE LA CALD PENTRU A STIMULA FLUXUL DE LAPTE ÎNAINTE DE ALĂPTARE  
 SL TOPLA UPORABA ZA STIMULACIJO TOKA MLEKA PRED DOJENJEM  
 GR ΖΕΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΘΗΛΑΣΜΟ  
 SK TOPLA UPORABA ZA STIMULACIJO TOKA MLEKA PRED DOJENJEM  
 CZ TEPLÉ POUŽÍVÁNÍ K STIMULACI TOKU MLÉKA PŘED KOJENÍM  
 HU MELEGEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT A TEJ ÁRAMLÁSÁNAK SERKENTÉSÉRE SZORÍTÁS ELŐTT  
 BG ИЗПОЛЗВАТ СЕ ТОПЛИ, ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПОТОКА ОТ МЛЯКО ПРЕДИ КЪРМЕНЕ

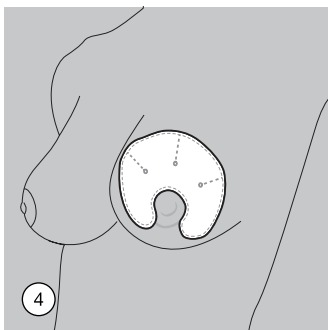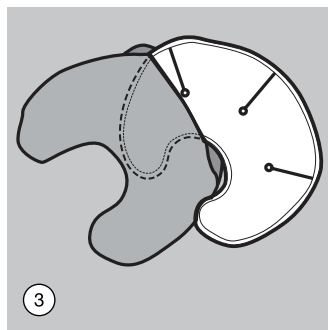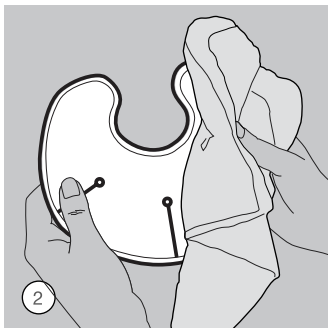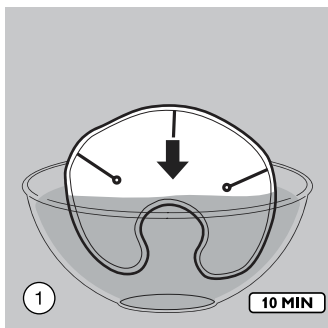

**IT** USO A FREDDO, O SUPER-FREDDO, PER ALLEVIARE IL SENO IRRITATO O GONFIO  
**ES** USO FRÍO O EXTRAFRÍO PARA ALIVIAR EL PECHO IRRITADO O INFLAMADO  
**EN** COLD AND EXTRA COLD USE TO RELIEVE IRRITATED OR SWOLLEN BREAST  
**FR** UTILISATION FROIDE ET TRÈS FROIDE POUR SOULAGER LES SEINS IRRITÉS OU ENFLÉS  
**DE** GEBRAUCH VON KÄLTE UND EXTRA KÄLTE BEI GEREIZTEN ODER GESCHWOLLENEN BRÜSTEN  
**PT** USO FRIO E EXTRA FRIO PARA ALIVIAR O PEITO IRRITADO OU INCHADO  
**RO** UTILIZARE LA RECE SAU FOARTE RECE PENTRU A CALMA IRRITAȚIILE SAU  
**SL** HLADNA IN POSEBEJ HLADNA UPORABA ZA OMILITEV RAZDRAŽENIH ALI OTEKLIH PRSI  
**GR** ΚΡΥΑ ΚΑΙ EXTRA ΚΡΥΑ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΤΕ ΤΟ ΕΠΕΘΙΣΜΕΝΟ Ή ΠΗΞΙΜΕΝΟ ΣΤΗΘΟΣ  
**SK** HLADNA IN POSEBEJ HLADNA UPORABA ZA OMILITEV RAZDRAŽENIH ALI OTEKLIH PRSI  
**CZ** STUDENÉ A VELMI STUDENÉ POUŽÍVÁNÍ PRO UVOLNĚNÍ PODRÁŽDĚNÍ NEBO NATEČENÍ PRSOU  
**HU** HIDEG ÉS NAGYON HIDEG HASZNÁLAT AZ IRRITÁLÓDOTT VAGY DUZZADT MELLEK MEGNYUGTATÁSÁRA  
**BG** ИЗПОЛЗВАТ СЕ СТУДЕНИ И МНОГО СТУДЕНИ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА РАЗДРАЗНЕНИ ИЛИ ПОДУТИ ГЪРДИ

**B**

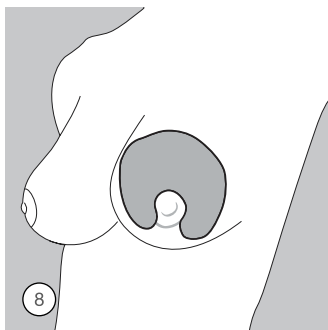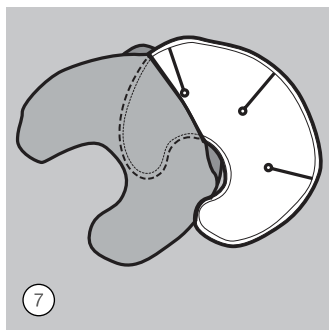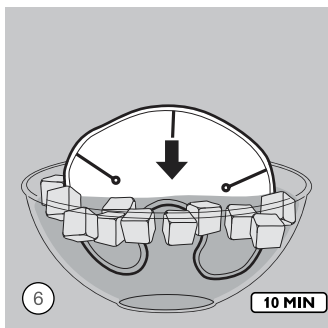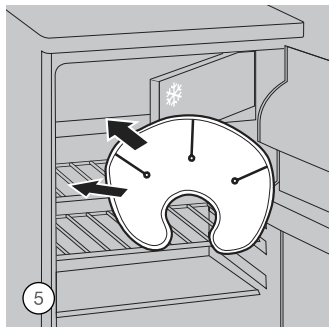

## **DE** NUVITA 1256 - 2 Thermopads für die Brustpflege

Vor dem ersten Gebrauch sollte der Ärmel gewaschen und getrocknet werden. Es ist zwingend, Ärmel und Thermopad zusammen zu benutzen. Prüfen Sie die Temperatur des Thermopads mit dem Handrücken bevor Sie es auf Ihre Brust legen. Verwenden Sie das Thermopad nur, wenn die Temperatur die richtige Wärme oder Kälte hat.

### **(A) GEBRAUCH VON WÄRME STIMULIERT DEN MILCHFLUSS VOR DEM STILLEN**

- 1.) Weichen Sie das Thermopad in einem Gefäß oder Becken mit warmem Wasser ein bis das Optimum und eine angenehme Temperatur erreicht sind.
- 2.) Trocknen Sie das Thermopad.
- 3.) Platzieren Sie das Thermopad in den Ärmel.
- 4.) Legen Sie das Thermopad auf Ihre Brust.

### **(B) GEBRAUCH VON KÄLTE UND EXTRA KÄLTE BEI GEREIZTEN ODER GESCHWOLLENEN BRÜSTEN**

- 5.) Legen Sie das Thermopad mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank oder 30 Minuten in den Eisschrank.
- 6.) Sie können das Thermopad auch in einem Gefäß/Becken mit eiskaltem Wasser einweichen.
- 7.) Trocknen Sie das Thermopad und schieben Sie es in den Ärmel
- 8.) Legen Sie das Thermopad auf Ihre Brust.

### **Reinigen und Aufbewahren**

Das Thermopad sollte vor dem ersten Gebrauch und nach jeder Anwendung mit warmem Wasser und Seife gereinigt werden. Benutzen Sie keine scharfen Gegenstände oder starke Reiniger. Legen Sie das Thermopad zur Aufbewahrung an einen kühlen und trockenen Platz, ausser Reichweite von Kindern.

Sicherheitsrichtlinien und Diagnose

- Das Thermopad nicht in der Mikrowelle benutzen. Nicht überhitzen.
- Nur für den äußeren Gebrauch. Benutzen Sie das Thermopad ausschließlich mit dem mitgelieferten Ärmel.
- Das Thermopad nicht direkt auf der Haut platzieren, wenn es gefroren ist.
- Das Thermopad sollte nicht während des Stillens oder Abpumpens benutzt werden. Nicht auf empfindlicher Haut anwenden. Nicht bei Kindern anwenden.
- Entsorgen Sie das Thermopad, wenn Sie Anzeichen von Schäden entdecken.
- Schlafen Sie nicht ein während Sie die Packung benutzen.
- Konsultieren Sie Ihren Arzt bei weiteren Fragen zur Benutzung dieses Produktes.

Inhalt: 2 X Gel Thermopads, 2 X Ärmel

### **GARANTIE – KONTIATIONEN UND BEDINGUNGEN**

In Zustimmung mit laufenden Vorschriften hat das

Produkt eine Garantie von 24 Monaten( gesetzliche Garantie). Die Garantie startet am Tag des Kaufdatums auf ihrem Beleg und haftet für Material- oder Produktionsfehler.

Ausgeschlossen der gesetzlichen 24 Monatigen Garantie sind Verbrauchermaterialien (Bsp. Batterien, Bürstenköpfe und Verschleißteile).

Die gesetzliche Garantie von 24 Monaten erlischt wenn:

1. Das Produkt unzulässig verändert wurde und dadurch einen ästhetischen Schaden aufweist, der nicht in Einstimmung mit der Bedienungsanleitung ist.
2. Das Produkt wurde verändert und /oder manipuliert.
3. Die Störungsursache ist durch eine schlechte Behandlung des Gegenstandes entstanden. (Bsp. Oxidation oder die Farbe blättert auf Grund von Wassereinfluss oder anderen Flüssigkeitseinflüssen ab, Schmutz blockiert die Einheiten oder Batterieflüssigkeit läuft aus).

Die folgenden Punkte sind ausgeschlossen von der gesetzlichen 24 Monatigen Garantie:

1. Die Kosten beziehen sich auf den Austausch oder auf die Reparatur von Verschleißteilen oder auf eine übliche Erhaltung des Produkts.
2. Die Ausgaben beziehen sich auf den Transport des Produkts zum oder vom Geschäft, wo das Produkt erworben wurde oder von der berechtigten Übergabe Station.
3. Ein Schaden, der das Ergebnis einer nicht zulässigen Installation oder einer unzulässigen Nutzung des Produkts ist , der nicht in Einstimmung mit der Anleitung im Handbuch ist.
4. Schäden durch Naturkatastrophen, Unfälle oder schlechte Bedienungen, die nicht vereinbar mit dem Produkt sind.
5. Nachlässige Fehler, die Auswirkungen auf die Produktleistung haben.

Der Hersteller, Händler und alle die am Verkauf beteiligt sind, übernehmen keine Haftung für Verluste oder wirtschaftlichen Schäden aus der Fehlfunktion des Produkts. In Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften müssen der Hersteller, Händler und allen Beteiligten am Verkauf nicht in jedem Fall Schadensersatz übernehmen, einschließlich direkte oder indirekte Schäden, außerplanmäßige Minderungen, Verlust von Ersparnissen und zusätzliche Schäden oder andere Konsequenzen, die nicht die Garantie, Vertrag oder Haftung verletzen. Missverhalten, die Unfähigkeit das Produkt zu nutzen oder das Vernachlässigen von Papier- und digitalen Dokumenten, einschließlich der Mangel an Service verletzt die Garantie, den Vertrag und die Haftung nicht.

Für weitere Informationen besuchen Sie unseren Hilfe-Service auf unserer Internetseite [www.nuvitababy.com](http://www.nuvitababy.com)



[info@nuvitababy.com](mailto:info@nuvitababy.com)

NUVITA® is a trademark distributed by Anteprema Brands International Ltd. - Europe  
All rights reserved