








- **IT** 2 Cuscinetti in Gel Termico per il Seno
- **ES** 2 Almohadillas Térmicas para el Cuidado del Pecho
- **EN** 2 Thermal Gel Breast Pads
- **FR** 2 Coussinets d'Allaitement en Gel Thermique
- **DE** 2 Thermogel-Stilleinlagen

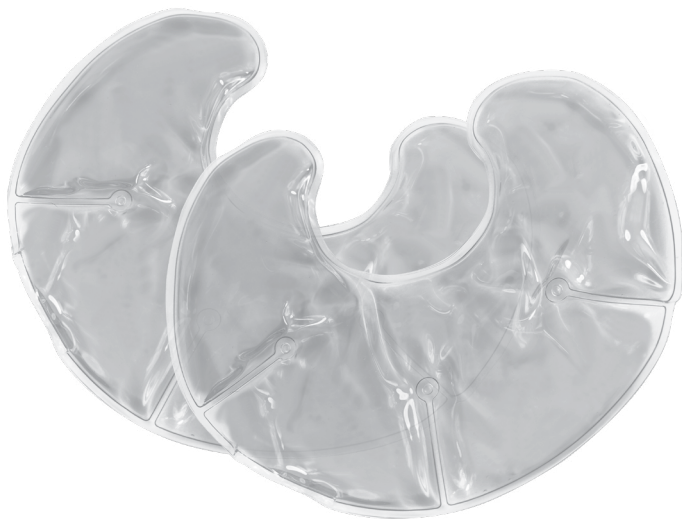

- **IT** Manuale di Istruzioni
- **FR** Manuel d'Instructions
- **ES** Manual de Instrucciones
- **DE** Bedienungsanleitung
- **EN** Instruction Manual





A

IT USO A CALDO PER STIMOLARE IL FLUSSO DI LATTE PRIMA DELL'ALLATTAMENTO
ES USO CALIENTE PARA ESTIMULAR EL FLUJO DE LECHE ANTES DE DAR DE MAMAR
EN WARM USE TO STIMULATE THE MILK FLOW BEFORE NURSING
FR UTILISATION CHAUDE POUR STIMULER L'AFFLUX DE LAIT AVANT D'ALLAITER
DE GEBRAUCH VON WÄRME STIMULIERT DEN MILCHFLUSS VOR DEM STILLEN
PT USO QUENTE PARA ESTIMULAR O FLUXO DE LEITE ANTES DA AMAMENTAÇÃO
RO UTILIZARE LA CALD PENTRU A STIMULA FLUXUL DE LAPTE ÎNAINTE DE ALĂPTARE
SL TOPLA UPORABA ZA STIMULACIJO TOKA MLEKA PRED DOJENJEM
GR ΖΕΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΘΗΛΑΣΜΟ
SK TOPLA UPORABA ZA STIMULACIJO TOKA MLEKA PRED DOJENJEM
CZ TEPLÉ POUŽÍVÁNÍ K STIMULACI TOKU MLÉKA PŘED KOJENÍM
HU MELEGEN TÖRTÉNŐ HASZNÁLAT A TEJ ÁRAMLÁSÁNAK SERKENTÉSÉRE SZORZATÁS ELŐTT
BG ИЗПОЛЗВАТ СЕ ТОПЛИ, ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПОТОКА ОТ МЛЯКО ПРЕДИ КЪРМЕНЕ

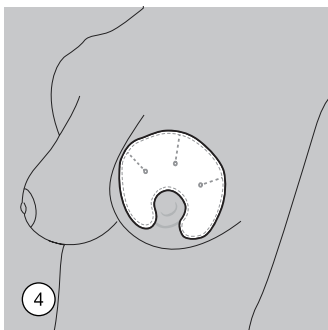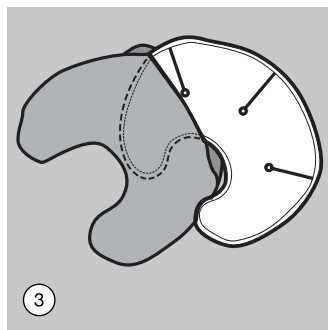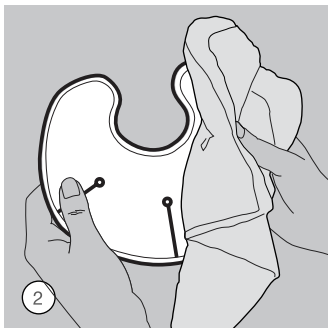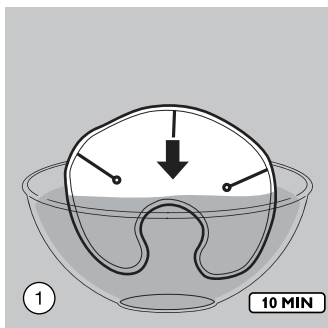

IT USO A FREDDO, O SUPER-FREDDO, PER ALLEVIARE IL SENO IRRITATO O GONFIO
ES USO FRÍO O EXTRAFRÍO PARA ALIVIAR EL PECHO IRRITADO O INFLAMADO
EN COLD AND EXTRA COLD USE TO RELIEVE IRRITATED OR SWOLLEN BREAST
FR UTILISATION FROIDE ET TRÈS FROIDE POUR SOULAGER LES SEINS IRRITÉS OU ENFLÉS
DE GEBRAUCH VON KÄLTE UND EXTRA KÄLTE BEI GEREIZTEN ODER GESCHWOLLENEN BRÜSTEN
PT USO FRIO E EXTRA FRIO PARA ALIVIAR O PEITO IRRITADO OU INCHADO
RO UTILIZARE LA RECE SAU FOARTE RECE PENTRU A CALMA IRRITAȚIILE SAU
SL HLADNA IN POSEBEJ HLADNA UPORABA ZA OMILITEV RAZDRAŽENIH ALI OTEKLIH PRSI
GR ΚΡΥΑ ΚΑΙ EXTRA ΚΡΥΑ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΤΕ ΤΟ ΕΠΕΘΙΣΜΕΝΟ Ή ΠΗΞΙΜΕΝΟ ΣΤΗΘΟΣ
SK HLADNA IN POSEBEJ HLADNA UPORABA ZA OMILITEV RAZDRAŽENIH ALI OTEKLIH PRSI
CZ STUDENÉ A VELMI STUDENÉ POUŽÍVÁNÍ PRO UVOLNĚNÍ PODRÁŽDĚNÍ NEBO NATEČENÍ PRSOU
HU HIDEG ÉS NAGYON HIDEG HASZNÁLAT AZ IRRITÁLÓDOTT VAGY DUZZADT MELLEK MEGNYUGTATÁSÁRA
BG ИЗПОЛЗВАТ СЕ СТУДЕНИ И МНОГО СТУДЕНИ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА РАЗДРАЗНЕНИ ИЛИ ПОДУТИ ГЪРДИ

B

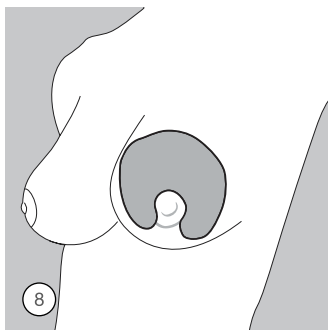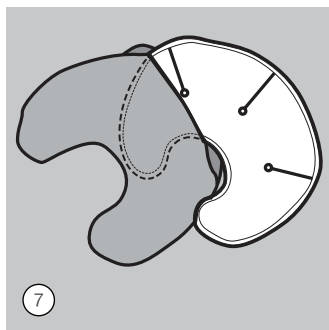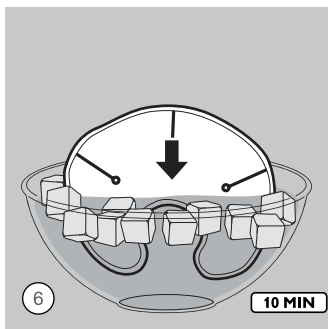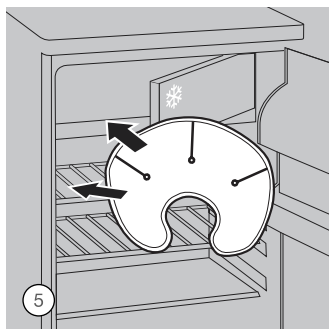

GR NUVITA 1256 - 2 Θερμικά επιθέματα στήθους από γέλη

Πριν τη χρήση του προϊόντος για πρώτη φορά, πλύνετε το περιβλήμα και στεγνώστε το. Είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιείτε το περιβλήμα μαζί με το thermopad. Ελέγξτε τη θερμοκρασία του thermopad στο πίσω μέρος του χεριού σας πριν το εφαρμόσετε στο στήθος σας. Εφαρμόστε το thermopad μόνο εάν η θερμοκρασία βρίσκεται στο σωστό επίπεδο θερμότητας ή ψυχρότητας.

(Α) ΖΕΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΘΗΛΑΣΜΟ

- 1.) Μουλιάστε το thermopad σε μια λεκάνη με ζεστό νερό μέχρι να φτάσει στη βέλτιστη και κατάλληλη θερμοκρασία.
 - 2.) Σκουπίστε για να στεγνώσει το thermopad.
 - 3.) Βάλτε το thermopad στο εσωτερικό του περιβλήματος.
 - 4.) Τοποθετήστε το thermopad στο στήθος.
- (Β) ΚΡΥΑ ΚΑΙ ΕΧΤΡΑ ΚΡΥΑ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΕΤΕ ΤΟ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ Ή ΠΡΗΣΜΕΝΟ ΣΤΗΘΟΣ**

- 1.) Τοποθετήστε το thermopad στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα ή στην κατάψυξη για τουλάχιστον 30 λεπτά.
 - 6.) Μπορείτε επίσης να βυθίσετε το thermopad σε μια λεκάνη με κρύο παγωμένο νερό
 - 7.) Σκουπίστε και βάλτε το thermopad στο εσωτερικό του περιβλήματος
 - 8.) Τοποθετήστε το thermopad στο στήθος. Καθαρισμός και αποθήκευση
- Βεβαιωθείτε πως έχετε καθαρίσει το thermopad με ζεστό νερό και υγρό καθαρισμού πριν από τη χρήση του την πρώτη φορά και μετά από κάθε χρήση. Ποτέ μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υλικά περιέχουν αιχμηρά άκρα ή ισχυρά απορρυπαντικά. Τοποθετήστε το thermopad σε δροσερό και ξηρό μέρος μακριά από παιδιά.

Οδηγίες ασφαλείας και διάγνωση

- Μην χρησιμοποιείτε το thermopad σε φούρο μικροκυμάτων. Δεν πρέπει να υπερθερμανθεί.
- Μόνο για εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιήστε το thermopad μόνο με το περιβλήμα που συμπεριλαμβάνεται.
- Μην τοποθετείτε το thermopad απευθείας στο δέρμα όταν έχει παγώσει.
- Το thermopad δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ενώ βγάζετε γάλα ή ενώ ταιζέτε το παιδί σας. Μην εφαρμόζετε σε ευαίσθητο δέρμα. Μην το χρησιμοποιείτε σε βρέφη.
- Πετάξτε το thermopad αμέσως αν δείτε άμεσα σημάδια βλάβης.
- Μην αποκοιμηθείτε καθώς χρησιμοποιείτε το πακέτο.
- Συμβουλευτείτε ένα γιατρό για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος.

Περιεχόμενο: 2 X Gel Thermopads, 2 X Περιβλήματα

ΕΓΓΥΗΣΗ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής παρέχει στ ον καταναλωτή μια νόμιμη εγγύηση 24

μηνών από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη.

Εξαιρούνται από την εγγύηση τα "αναλώσιμα" μέρη (πχ μπαταρίες, βουρτσάκια ή μέρη που υπόκεινται σε φθορά).

Η νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών ακυρώνεται εάν:

1. Το προϊόν έχει υποστεί αισθητή βλάβη εξαιτίας λανθασμένης χρήσης που δεν συνάδει με τις οδηγίες του χειριριδίου.
2. Το προϊόν έχει τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί.
3. Ατία της αποτυχίας χρήσης ήταν η ανεπαρκής συντήρηση των εξαρτημάτων/των μερών (πχ οξείδωση ή σκουρίσματος λόγω κατακράτησης νερού ή άλλων υγρών, κατακάθια που μπλοκάρουν τον αισθητήρα, διαρροή υγρού μπαταριών.)

Εξαιρούνται τα παρακάτω από τη νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών:

1. Κόστος αντικατάστασης ή επισκευής μερών που υπόκεινται σε φθορά ή κόστος κανονικής συντήρησης του προϊόντος.
2. Το κόστος και οι κίνδυνοι που περιλαμβάνονται στη μεταφορά του προϊόντος από και προς το κατάστημα όπου αγοράστηκε για την παραλαβή των μερών που καλύπτονται από την εγγύηση.
3. Βλάβη που προκαλείται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του χειριριδίου.
4. Βλάβη εξαιτίας φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων ή δυσμενών συνθηκών που δεν είναι συμβατές με το προϊόν.
5. Ελαττώματα που έχουν ασημαντή επίδραση στην απόδοση του προϊόντος.

Ο κατασκευαστής, ο διανομητής και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην πώληση δεν φέρουν καμία ευθύνη για απώλειες ή οικονομική ζημία από την δυσλειτουργία του προϊόντος. Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής, ο διανομητής και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην πώληση δε ευθύνονται σε καμία περίπτωση για βλάβες, συμπεριλαμβανομένων άμεσων ή έμμεσων, απώλεια καθαρών εσόδων ή οικονομικών και άλλων καταστάσεων που παραβιάζουν την εγγύηση, το συμβόλαιο, την αντικειμενική ευθύνη ή άλλους λόγους που προκύπτουν από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης του προϊόντος και των χάρτινων και ηλεκτρονικών εγγράφων, περιλαμβανομένης της έλλειψης υπηρεσιών.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Τα προϊόντα, τα εξαρτήματα και τα έγγραφα που τα συνοδεύουν έχο ν σχεδιαστεί με τέτοια φροντίδα έτσι ώστε σε περίπτωση προβλημάτων να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης και να επιλύετε μόνοι σας τυχόν προβλήματα. Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια επισκεφτείτε το www.nu.vitaboy.com



info@nuvitababy.com

NUVITA® is a trademark distributed by Anteprema Brands International Ltd. - Europe
All rights reserved