



IT Tiralatte Elettrico
ES Sacaleche Eléctrico
EN Electric Breast Pump
FR Tire-Lait Électrique
DE Elektrische Milchpumpe
PT Bomba Eléctrica de Mama
GR Ηλεκτρικό Θήλαστρο

Materno Go



1282M

IT Manuale di Istruzioni
ES Manual de Instrucciones
EN Instruction Manual
FR Manuel d'Instructions

DE Bedienungsanleitung
PT Manual de instruções
GR Εγχειρίδιο οδηγιών

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie haben eine der zuverlässigsten Milchpumpen gekauft, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Wir haben diesen Artikel benutzerfreundlich wie nur möglich gestaltet, jedoch befürchte ich, dass Sie noch kurz Zeit investieren müssen um diese Anweisung zu lesen, das Sie andernfalls nicht 100% von der Leistung, die dieser Artikel bietet, profitieren können. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für einen künftigen Zugriff an einem sicheren und trockenen Platz auf. Bitte vergewissern Sie, dass vier AA Alkalische Batterien zur Verfügung stehen, falls Sie das Gerät unterwegs benutzen möchten.


Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden
- Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen mit vollständiger Aufmerksamkeit während des gesamten Prozesses verwendet werden.
- Verwenden Sie kein anderes als das mitgelieferte Netzteil.
- Das Verbindungsrohr (*Packungsinhalt Nr. 10*) während des Gebrauchs nicht verziehen oder verknoten.
- Bitte stellen Sie das Produkt oder demontierte Teile außerhalb der Reichweite des Babys.
- Nehmen Sie die Milchpumpensteuereinheit (*Packungsinhalt Nr. 9*) unter keinen Umständen ab. Es muss vom Hersteller oder Fachmann repariert oder ersetzt werden.

Packungsinhalt

Bevor Sie die Milchpumpe montieren und nutzen, vergewissern Sie sich bitte, dass alle unten aufgeführten Teile in der Packung enthalten sind; falls Teile fehlen sollten, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, wo Sie den Artikel erworben haben:

1. Staubschutzabdeckung
2. Silikonkissen
3. Pumpenkörper
4. Silikon Überlaufschutz
5. Überlaufschutz
6. Saugventil
7. Muttermilchbehälter Mimic (150ml)
8. Mimic-Flasche-Silikonventil
9. Milchpumpen-Steuereinheit
10. Anschluss Schlauch
11. Staubschutzabdeckung
12. Trinksauger
13. Ring
14. Stromadapter
15. Samtbeutel (nicht auf dem Diagramm)
16. Flaschenadapter

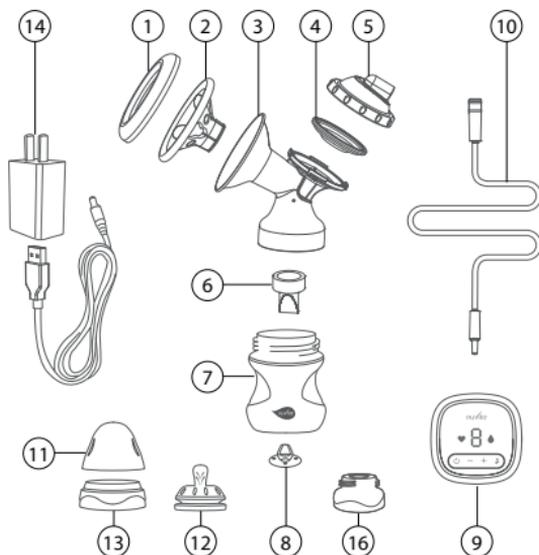

Reinigungsanweisungen

- Demontieren Sie vor dem Reinigen und Sterilisieren die Teile, die mit der Brust oder der Muttermilch in Kontakt kommen (außer der Brustpumpensteuereinheit (*Verpackungsinhalt Nr. 9*)).
- Die Brustpumpensteuereinheit (*Packungsinhalt Nr. 9*) nicht in Wasser reinigen.
- Die Brustpumpensteuereinheit (*Packungsinhalt Nr. 9*) nicht im Dampfsterilisator sterilisieren.
- Das Verbindungsrohr nicht heiß sterilisieren. Nur Kaltsterilisation. Ansonsten mit warmem Seifenwasser reinigen und dann mit sterilem Wasser abspülen. (*Paketinhalt Nr. 10*).
- Reinigen Sie die Teile sofort nach jedem Gebrauch, um Milchreste zu entfernen und das Wachstum von Bakterien zu vermeiden.
- Legen Sie die gereinigten Teile an einem schattigen und kühlen Ort auf ein sauberes, trockenes Tuch.


Produkteigenschaften

Ein wiederaufladbares elektrisches Einzelbrustpumpenmodell für die Maximierung des Milchgewinnungsprozesses. Es wurde entwickelt um den Saugrhythmus eines Säuglings zu simulieren.

1. Diese Milchpumpe nutzt eine 2 Phasen-Technik:
 - Erste Phase mit 9 automatischen Simulations-Levels für einen 2 minütigen Betrieb
 - Zweite Phase mit 9 wählbaren Levels für den besten Milchgewinnungsprozess
2. Dieser Artikel hat ein Anti-Reflex Schutzsystem, das den Rücklauf der Muttermilch in das Steuerungssystem verhindert und somit
3. einer Beschädigung während dem Abpumpen vorbeugt.
3. Ihr 1282M hat eine Memory-Funktion.
4. Ihr 1282M ist tragbar (AC/DC und batteriebetrieben) und somit passend für unterwegs und perfekt für das Abpumpen der Muttermilch auf der Arbeit.

Beschreibung der Steuereinheit der Milchpumpe

- | | |
|---|-------------------------------|
| A1. Taste zum Ein- und Ausschalten | B1. Level Anzeige |
| A2. Taste zur Modus-Änderung | B2. Stimmulationsmodusanzeige |
| A3. Taste zur Erhöhung der Saugkraft | B3. Pumpmodusanzeige |
| A4. Taste zur Reduzierung der Saugkraft | |

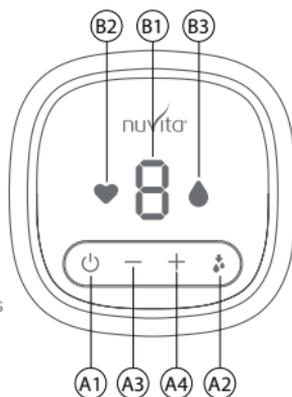




Absorption Frequenz Level des Nuvita 1282M:

- ♥ 1 bis 9 Dieser Stimmulationsmodus hat einen schnellen und kurzen Saugrhythmus.
- 💧 1 bis 9 Dieser Expressionsmodus simuliert das Saugen eines Säuglings. Der Rhythmus ist langsamer, tiefer und länger.

Montage

1. Platzieren Sie das Silikonkissen (*Paketinhalt Nr. 2*) wie auf der Abbildung ersichtlich in die Milchpumpe.
2. Bringen Sie das Anti-Spill-Silikon (*Paketinhalt Nr. 4*) wie unten gezeigt mit der Anti-Spill-Abdeckung (*Paketinhalt Nr. 5*) an. Zielen Sie auf den Schiebesechlitze und schrauben Sie die Anti-Spill-Abdeckung wie in der Abbildung gezeigt fest.
3. Befestigen Sie das Saugventil am unteren Ende der Milchpumpe wie unten abgebildet. (*Paketinhalt Nr. 6*).
4. Um den oberen Teil der Milchpumpe mit dem Weithalsfläschchen zu verbinden, drehen Sie bitte so lange, bis es fest sitzt.

5. Fügen Sie den Anschlusschlauch in den oberen Überlaufschutz ein. Fügen Sie das andere Ende des Anschlusschlauches in den Saugschlitz der Pumpe. (Paketinhalt Nr. 10) Siehe Diagramm unten. Stellen Sie die Flasche auf den Standfuß.

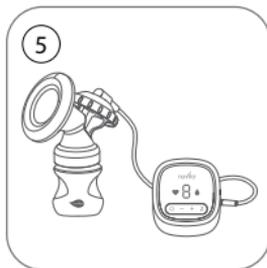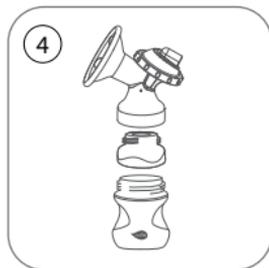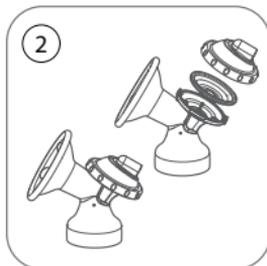

Gebrauch


1. Bevor Sie die Milchpumpe gebrauchen waschen Sie bitte Ihre Hände. Vergewissern Sie vor jedem Gebrauch, dass alle Teile sauber und einwandfrei montiert sind.
2. Nehmen Sie eine entspannte Sitzposition ein. Bitte vor dem Abpumpen ein Brustpolster mit Wärmeleitgel oder ein warmes Handtuch nutzen.
3. Benutzen Sie Ihre Hand um die Milchpumpe auf Ihrem Nippel zu zentrieren und stellen Sie sicher, dass es fest sitzt und somit keine Luft ein- oder austritt.
4. Einschalten, lange den Netzschalter drücken. Der Bildschirm der Maschine testet sich selbst und flackert. Das Gerät wechselt dann in den Stimulationsmodus. Die werkseitige Standardeinstellung ist Stufe 5. Nach 2 Minuten Stimulation wechselt das Gerät automatisch in den Pumpmodus. Die Maschine schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus.
5. Im Abpump-Modus, drücken Sie auf + oder - und selektieren eins von L1 bis L9. Das Gerät besitzt eine Memory-Funktion. Beim nächsten Abpumpen wird es das Level abrufen, das Sie zuvor ausgewählt hatten.
6. Demontieren, reinigen und sterilisieren die nicht-elektronischen Teile für Ihren nächsten Gebrauch.



Anschluss des Netzteils

WICHTIG: Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Netzteil anschließen.

1. Stecken Sie den runden Gleichstromstift des Netzteils in die Gleichstrombuchse an der Steuereinheit und stecken Sie das Netzteil wie in der Abbildung gezeigt in die Steckdose.
2. Wenn der Akku schwach ist, flackert die Ziffer auf dem Bildschirm (Füllstandsanzeige) und zeigt an, dass der Akku aufgeladen werden muss.
3. Während des Ladevorgangs bewegt sich die Zeile der Ziffer auf dem Bildschirm im Uhrzeigersinn und flackert, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Lademodus befindet (siehe Abbildung). Wenn das Gerät voll aufgeladen ist, schaltet es sich automatisch aus.

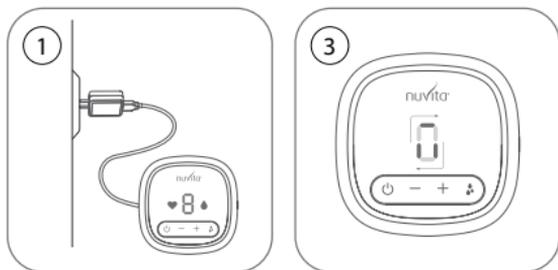

DIENTST: Die Umsetzung der Produkte, Bestandteile der Packung und Dokumentation fand mit Sorgfalt statt. Falls dennoch Probleme auftauchen sollten, wird empfohlen die Schritte der Gebrauchsanweisung zu wiederholen. Für weitere Informationen und den Kundendienst besuchen Sie bitte: www.nuvitababy.com

GARANTIE – KUNDENTEST UND BEDINGUNGEN: In Zustimmung mit laufenden Vorschriften hat das Produkt eine Garantie von 24 Monaten (gesetzliche Garantie). Die Garantie startet am Tag des Kaufdatums auf ihrem Beleg und haftet für Material- oder Produktionsfehler. Ausgeschlossen der gesetzlichen 24 monatigen Garantie sind Verbrauchermaterialien (Bsp. Batterien, Bürstenköpfe und Verschleißteile). **Die gesetzliche Garantie von 24 Monaten erlischt wenn:** 1) Das Produkt unzulässig verändert wurde und dadurch einen ästhetischen Schaden aufweist, der nicht in Einklang mit der Bedienungsanleitung ist. 2) Das Produkt wurde verändert und /oder manipuliert. 3) Die Störungsursache ist durch eine schlechte Behandlung des Gegenstandes entstanden. (Bsp. Oxidation oder die Farbe blättert auf Grund von Wassereinfluss oder anderen Flüssigkeitseinflüssen ab, Schmutz blockiert die Einheiten oder Batterieflüssigkeit läuft aus). **Die folgenden Punkte sind ausgeschlossen von der gesetzlichen 24 monatigen Garantie:** 1) Die Kosten beziehen sich auf den Austausch oder auf die Reparatur von Verschleißteilen oder auf eine übliche Erhaltung des Produkts. 2) Die Ausgaben beziehen sich auf den Transport des Produkts zum oder vom Geschäft, wo das Produkt erworben wurde oder von der berechtigten Übergabe Station. 3) Ein Schaden, der das Ergebnis einer nicht zulässigen Installation oder einer unzulässigen Nutzung des Produkts ist, der nicht in Einklang mit der Anleitung im Handbuch ist. 4) Schäden durch Naturkatastrophen, Unfälle oder schlechte Bedienungen, die nicht vereinbar mit dem Produkt sind. 5) Nachlässige Fehler, die Auswirkungen auf die Produktleistung haben. Der Hersteller, Händler und alle die am Verkauf beteiligt sind, übernehmen keine Haftung für Verluste oder wirtschaftlichen Schäden aus der Fehlfunktion des Produkts. In Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften müssen der Hersteller, Händler und allen Beteiligten am Verkauf nicht in jedem Fall Schadensersatz übernehmen, einschließlich direkte oder indirekte Schäden, außerplanmäßige Minderungen, Verlust von Ersparnissen und zusätzliche Schäden oder andere Konsequenzen, die nicht die Garantie, Vertrag oder Haftung verletzen. Missverhalten, die Unfähigkeit das Produkt zu nutzen oder das Vernachlässigen von Papier- und digitalen Dokumenten, einschließlich der Mangel an Service verletzt die Garantie, den Vertrag und die Haftung nicht.



www.nuvitababy.com

Imported/Distributed by
Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia
Malta - Europe