



1287X24 1287X28



IMPORTED / DISTRIBUTED BY:

Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020
Gwardamangia, Malta - Europe
info@nuvitababy.com | www.nuvitababy.com
All rights reserved


DE

SET MIT 2 BRUSTAUFSÄTZEN

Die Milchentnahme sollte eine angenehm sein und die Größe der Brustaufsätze hat großen Einfluss auf die Erfahrung, die bei der Verwendung der Milchpumpe gemacht wird. Die austauschbaren Nuvita-Brustaufsätze, die mit allen Modellen der Materno Smart X-Serie kompatibel sind, sind in 3 Größen erhältlich: 20, 24 oder 28mm.

SO WÄHLEN SIE DEN RICHTIGE BRUSTAUFSATZ AUS:

1. Messen Sie mit einem Lineal oder einem Maßband den Durchmesser der Brustwarze (in mm), wobei Sie über die Mitte messen und den Warzenhof ausschließen.
2. Wählen Sie basierend auf der gemessenen Größe den Brustaufsatz aus, der dem gemessenen Wert am nächsten kommt.

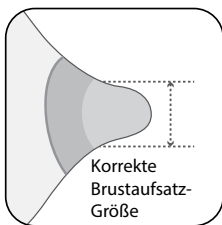

GRÖSSE DER BRUSTWARZE

BIS ZU
16 mm

BIS ZU
20 mm

BIS ZU
24 mm

Ø 20 mm


Ø 24 mm

Ø 28 mm

WIE MAN DIE RICHTIGE BRUSTAUFSATZGRÖSSE FESTSTELLT:


PASSEND

Bleibt die Brustwarze beim Bedienen der Milchpumpe in der Mitte und bewegt sie sich frei und ohne Beschwerden, hat der verwendete Brustaufsatz die richtige Größe.

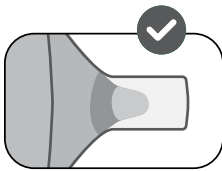


ZU KLEIN

Wenn die Brustwarze an der Seite des Tunnels reibt, rot wird und die Anwendung unangenehm ist, ist der Brustaufsatz zu klein.

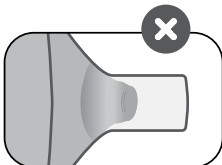

ZU GROSS

Wenn die Brustwarze und der umliegende Warzenhof in den Tunnel gezogen und weißlich werden, ist der Brustaufsatz zu groß.

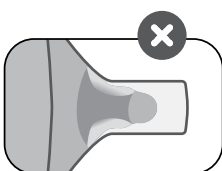

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

- Vor jedem Gebrauch prüfen.
- Beim ersten Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung entsorgen.
- Wenden Sie sich bei Problemen oder Schmerzen an Ihren Arzt.

ZUSAMMENSETZUNG UND VERWENDUNG

- Verbinden Sie den Brustaufsatz mit dem Anschluss der Nuvita Materno Smart Milchpumpe.
- Vergewissern Sie sich, dass der Brustaufsatz und der Stecker fest zusammengebaut sind.

REINIGUNG

- **Reinigen Sie den Brustaufsatz sofort nach Gebrauch, um ein Eintrocknen von Milchresten und Bakterienbildung zu vermeiden.**
- **Verwenden Sie zur Reinigung nur Trinkwasser.**
- **Wenn Sie eine Bürste verwenden, achten Sie darauf, die Komponenten nicht zu beschädigen.**
- **Reinigen Sie den Brustaufsatz 2 Minuten lang in heißem Wasser.**
- **Kaltsterilisation empfehlen.**

NACH JEDEM GEBRAUCH

- Spülen Sie den Brustaufsatz mit kaltem, sauberem Wasser ab.
- Mit viel warmem Wasser und mildem Geschirrspülmittel reinigen.
- Mit sauberem kaltem Wasser abspülen.
- Mit einem sauberen Tuch abtrocknen oder auf einem sauberen Tuch trocknen lassen.
- Bis zur nächsten Verwendung in einer sauberen Aufbewahrungstasche, einem Tuch oder Papier aufbewahren.

VOR JEDEM GEBRAUCH

- Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Seife und sauberem Wasser, bevor Sie Ihre Brüste berühren.
- Reinigen Sie die Brust und die Umgebung mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine Seife oder Alkohol, da diese die Haut austrocknen und rissige Brustwarzen verursachen können.