



1287X24 1287X28



IMPORTED / DISTRIBUTED BY:

Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020
Gwardamangia, Malta - Europe
info@nuvitababy.com | www.nuvitababy.com
All rights reserved


ES

SET DE 2 EMBUDOS

La extracción de la leche debe ser una acción placentera y el tamaño del embudo influye mucho en el tipo de experiencia que se vive utilizando el extractor de leche. Los embudos intercambiables Nuvita, compatibles con todos los modelos de la línea Materno Smart X, están disponibles en 3 tamaños: 20, 24 o 28 mm.

CÓMO ELEGIR EL EMBUDO ADECUADO:

1. Con una regla o cinta métrica, mida el diámetro del pezón (en mm), pasando por el centro y excluyendo la areola.
2. Según los mm medidos, elija el embudo que se acerque más al valor medido.

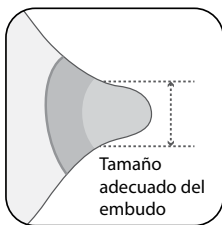


TAMAÑO DEL EMBUDO



COMO ENTENDER EL TAMAÑO ADECUADO DEL EMBUDO:


CORRECTO

Si el pezón permanece en el centro cuando se opera el sacaleches y se mueve libremente sin sentir ninguna molestia, el embudo utilizado es del tamaño correcto.

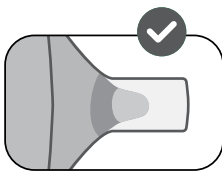


DEMASIADO PEQUEÑO

Si el pezón roza contra el lateral del túnel, se enrojece y se siente incómodo, el embudo es demasiado pequeño.

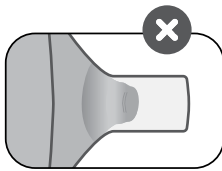

DEMASIADO GRANDE

Si el pezón y un trozo de la areola entran en el túnel y se vuelven blanquecinos, el embudo es demasiado grande.

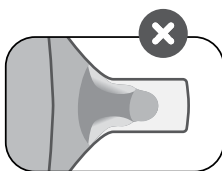

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Controlar antes de cada uso.
- Desechar a la primera señal de daño o desgaste.
- Si experimenta algún problema o dolor, consulte a su especialista en lactancia o a su médico.

MONTAJE Y USO

- Conecte el embudo al conector del set del sacaleches Nuvita Materno Smart
- Verifique que el embudo y el conector estén bien ensamblados.

LIMPIEZA

- **Cuando lo use por primera vez, desinfecte el embudo y lávelo inmediatamente después de cada uso para evitar que se sequen los residuos de leche y prevenir la formación de bacterias.**
- **Para la limpieza, utilice únicamente agua potable.**
- **Si utiliza un cepillo, tenga cuidado de no dañar los componentes.**
- **Limpie el embudo en agua tibia durante 2 minutos.**
- **No esterilizar con calor, sino desinfectar con productos especiales para frío.**

DESPUÉS DE CADA USO

- Enjuague el embudo con agua limpia y tibia.
- Limpiar con abundante agua tibia y detergente lavavajillas.
- Enjuague con agua limpia y tibia.
- Seque con un paño limpio o déjelo secar sobre un paño limpio.
- Guárdelo en una bolsa o recipiente estéril hasta el próximo uso.

ANTES DE CADA USO

- Lávese bien las manos con jabón y agua limpia antes de tocarse los senos.
- Limpie el seno y el área circundante con un paño húmedo.
- No use jabón ni alcohol, ya que pueden reseca la piel y provocar grietas en los pezones.