

MATERNO DUAL

Sacaleche Eléctrico

Introducción

Gracias por elegir el Sacaleche Eléctrico Doble Nuvita 1290 Materno Dual. Extraer la leche es más fácil con el Materno Dual, que permite a las madres como usted darle al bebé la mejor comida natural.

Información de Seguridad Importante

- Si no se respetan estas instrucciones y la información de seguridad, podría ser peligroso usar la bomba.
- Desenchufar el dispositivo si no se usa.
- No dejar el Materno Dual sin vigilancia cuando esté enchufado en una toma de corriente.
- Mantener secas las piezas eléctricas y no sumergir en agua.
- No tocar el aparato eléctrico si se ha caído al agua.
- Si no está en uso, apáguelo y desenchúfelo.

Características del Producto

- Materno Dual tiene características sin igual comparado con otros sacaleches eléctricos dobles del mercado.
- Es fácil de montar, y los botones y la pantalla LCD clara hacen que sea cómodo de usar.
- Sistema de 2 fases: estimulación y extracción.
- 9 niveles de extracción para sacar la leche cómodamente.
- Capacidad de extracción doble: elija entre bombeo único o doble.
- Funcionamiento silencioso y cómodo en un entorno tranquilo.
- El control de bombeo individual único se aplica al bombeo del lado izquierdo, derecho o dual. Pueden ajustarse distintos niveles de extracción en las bombas izquierda y derecha de acuerdo con las necesidades de la usuaria.
- Sistema cerrado antirreflujo que mantiene el aire fuera de la botella de recogida, a la vez que conserva la pureza de su leche materna.



ATENCIÓN

- Al usar el aparato con niños presentes, asegúrese de que hay adultos vigilando.
- Utilice el Materno Dual solo para su uso específico según se describe en el manual.
- No colocar el Materno Dual cerca de electrodomésticos que produzcan un campo magnético fuerte.
- No colocar el Materno Dual bajo la luz solar directa.

Preparar el Materno Dual

Las piezas siguientes que entran en contacto con la leche materna deben limpiarse y esterilizarse antes del uso:

- almohadillas de silicona
- cámaras
- conectores de botella
- membranas de las válvulas
- cuerpo de las válvulas
- botella de leche
- tapón de la botella
- adaptador de la botella

Conexión

Unidad de bombeo y dispositivo de succión: los tubos tienen 2 conectores en dos extremos. Acople el conector en el respiradero de la tapa de la cámara y el de la unidad de bombeo por separado. Asegúrese de que la conexión es firme para evitar las fugas de aire.

Unidad de bombeo y adaptador de CA: conecte el adaptador a la unidad de bombeo. Luego, enchúfelo a la toma de corriente. Inmediatamente, la pantalla LCD de la bomba parpadea, lo que significa que está en espera.




ATENCIÓN

- Use solamente el adaptador de corriente suministrado con el materno dual.
- Asegúrese de que el adaptador de corriente es compatible con la fuente de alimentación

Package Content

- | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Tapa antipolvo (x2) | 11. Tapón de inserción (x2) | 16. Unidad de bombeo (x1) | 19. Cuello de botella (x2) |
| 2. Almohadilla de silicona (x2) | 12. Tapón de botella (x2) | 17. Adaptador CA/CC (x1) | 20. Tapa de tetina antipolvo (x2) |
| 3. Soporte de plástico (x2) | 13. Adaptador de botella (x2) | 18. Tetina (x2) | 21. Bolsa del sacaleche (x1) |
| 4. Cámara (x2) | 14. Tubos (x2) | | |
| 5. Tapa de la cámara (x2) | 15. Conector de tubos (x4) | | |
| 6. Conector de la botella (x2) | | | |
| 7. Membrana de la válvula (x2) | | | |
| 8. Cuerpo de la válvula (x2) | | | |
| 9. Botella de cuello ancho (120ml) (x2) | | | |
| 10. Soporte de botella (x2) | | | |

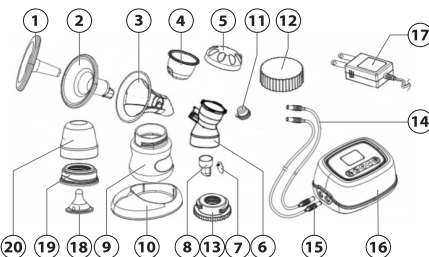

Montaje

1. Montaje de la almohadilla y el conector de la botella: ponga la almohadilla de silicona en el soporte de plástico e insértelo de forma lenta y firme en el conector de la botella.
2. Montaje de la cámara: ponga la cámara en el conector de la botella, tápela con la tapa de la cámara para girarla firmemente. Luego conéctela con el conector del tubo. Evite las fugas de aire.
3. Montaje de la membrana de la válvula: presione la membrana de la válvula para introducirla en el orificio del cuerpo de la válvula. La membrana de la válvula debe presionarse para que quede plana y firme para evitar las fugas de aire. Conecte firmemente la membrana de la válvula con el cuerpo de la válvula en el conector de la botella.
4. Montaje de la botella y el soporte de la botella: conecte la botella al conector de esta y luego póngala sobre el soporte de la botella.

Estimulación y Extracción

Sitúe el embudo en su seno para centrar adecuadamente el pezón en el dispositivo.

1. Conecte el motor de la bomba principal a la toma de corriente. Pulse el botón On/Off para encenderlo. El temporizador de 30 minutos se pondrá en marcha y comenzará la fase de estimulación en el nivel 1 en el pecho izquierdo y el derecho simultáneamente. Este paso continuará durante dos minutos antes de entrar en la fase de extracción en el nivel 3, que es un ajuste de fábrica predeterminado.
 2. Si la leche empieza a fluir antes, pulsa el botón Phase (Fase) para alternar entre las fases de estimulación y extracción.
 3. Asegúrese de que la leche fluye hasta la botella adecuadamente.
 4. Pulse el botón Phase (Fase), lo que le permitirá alternar entre las fases de estimulación y extracción.
- Es posible ajustar el nivel de fuerza de extracción en cada fase de vacío. Vacío cómodo: use el botón + para aumentar el vacío hasta que sea ligeramente incómodo. Luego pulse el botón - para reducirlo mínimamente.
- Pulse el botón Function (Función) para seleccionar si quiere operar el dispositivo en el modo izquierdo o (Left), derecho (Right) o dual (Dual).
- En la fase de extracción, ajuste individualmente el nivel de vacío deseado a izquierda y derecha.
7. Cuando la bomba funcione usando la bomba izquierda, pulse el botón + o - para ajustar el nivel de vacío deseado para la izquierda. El procedimiento es el mismo para la bomba derecha. Si pulsa el botón Function (Función) de nuevo, la bomba estará en modo dual con el nivel de vacío respectivo a izquierda y derecha.

Almacenar y Descongelar Leche Materna

Debe almacenar y descongelar la leche materna correctamente. Es la única manera de conservar todos los nutrientes importantes y minimizar la contaminación bacteriana. Nuvita Baby recomienda respetar las pautas siguientes para almacenar y descongelar la leche materna para bebés a término sanos.

Consejos para congelar y descongelar leche materna

1. Nunca llene las botellas y las bolsas más allá de su capacidad para que haya espacio para una posible expansión.
2. Etiquete la botella y la bolsa con la fecha de extracción de la leche.
3. Guárdela en la zona de atrás inferior de la nevera, donde la temperatura es más fría.
4. Descongele la leche materna en la nevera por la noche, o bien sitúe la botella o la bolsa bajo agua caliente a 37 °C. Tenga cuidado para no quemarse.
5. Agite la botella o la bolsa ligeramente para mezclar la grasa que se haya separado.
6. No descongele la leche materna en un microondas.
7. Descongele la leche materna a 37 °C como máximo para que no pierda los nutrientes.

Limpieza

Antes de usar su sacaleche eléctrico Materno Dual, desmonte, lave y esterilice todas las piezas. No esterilice los tubos ni el adaptador de los tubos. Seque las piezas al aire libre o con una toalla antes de volver a montarlas para el próximo uso.

Las piezas parcialmente secas podrían afectar negativamente al funcionamiento del Materno Dual. Asegúrese de que todas las piezas están secas antes de usarlas.

Antes de Cada Uso

1. Lave las manos cuidadosamente con jabón y agua caliente antes de manejar el Materno Dual, la unidad de bombeo o cualquier otro accesorio.
2. Asegúrese de que los tubos no contienen líquido. No use el Materno Dual si se ve algún líquido en los tubos.

Instrucciones de Limpieza de los Tubos

1. Pase un trapo limpio y húmedo por el exterior de los tubos. Evite introducir agua u otros fluidos en el interior de los tubos.
2. Si hay líquido en el interior de los tubos, acélelos con agua caliente y limpia. Cuélguelos y deje SECAR AL AIRE LIBRE ANTES DEL USO. NO introduzca ningún objeto en los tubos.

Instrucciones Generales de Limpieza

1. Deje a un lado los tubos y el conector de los tubos. En condiciones normales de funcionamiento de la bomba, el diafragma impediría el reflujo de la leche. No es necesario lavar estas piezas. En caso de encontrar vapor o líquido dentro de los tubos, siga las instrucciones de limpieza de los tubos antes del uso.
2. Todas las piezas del Materno Dual pueden limpiarse en el compartimento superior del lavavajillas, o bien a mano con jabón en agua caliente.
3. No use disolventes ni abrasivos.
4. Aclare con agua caliente y limpia.
5. Para limpiar la base del Materno Dual, pase un trapo húmedo por la base usando solamente agua o agua mezclada con un jabón suave.



NOTA

Antes de cada uso, inspeccione visualmente las partes individuales en busca de grietas, astillas, roturas, decoloración o debilitamiento, ya que esto podría afectar a la eficacia del sacaleche Materno Dual. Si el daño es obvio, deje de usarlo. Sustituya las piezas inmediatamente.

Solución de Problemas

Si no hay succión o es muy baja

1. Compruebe si todas las conexiones están acopladas correctamente en todos los puntos de conexión.
2. Compruebe si la membrana de la válvula está ajustada de forma segura y plana en el cuerpo de la válvula.
3. Sostenga el embudo, no el conector ni la botella, durante la extracción.
4. Asegúrese de que el embudo forma un sello alrededor del pecho.
5. No debería haber agua en los tubos.
6. Todas las piezas deben estar secas.

La bomba se moja

1. Desenchufe el adaptador de corriente.
2. Desconecte la bomba.
3. No coloque la bomba al revés. El panel de control debe mirar hacia arriba.
4. Guarde la bomba en un lugar fresco y seco durante 24 horas.

La bomba no se enciende

1. Compruebe si el cable está acoplado correctamente a la bomba.
2. Compruebe si la toma de corriente de la pared está conectada.
3. Contacte con el distribuidor o la tienda donde compró la bomba.

Servicio

Se ha tenido todo el cuidado en la realización de los productos y accesorios provistos en el embalaje y en la documentación presentada, por lo que en caso de que le surjan problemas, es aconsejable repetir las operaciones siguiendo fielmente las instrucciones del manual.

Para más información sobre el servicio de asistencia, visite el sitio web: www.nuvitababy.com

GARANTIA – CONDICIONES

Este producto tiene una garantía de 24 meses sobre los materiales y los defectos de fabricación del producto, después de la fecha de compra (mira ticket de compra).

La garantía de 24 meses no incluye daños causados por el uso habitual de objetos clasificados como material del consumo (pilas, cabezales o partes sujetas a desgaste diario).

La garantía legal de 24 meses es inválida si:

1. El producto tiene daños estéticos debidos a uso inadecuado del producto no conforme a las instrucciones contenidas en el manual.
2. El producto ha sido modificado y/o dañado.
3. La causa del malfuncionamiento es debida a la poca manutención de los componentes y/o accesorios y/o piezas (ej. Oxidación y/o redimensionamiento debido a retención de agua u otros líquidos, residuos que bloqueen el sensor, pérdida del líquido corrosivo de las baterías).

Los siguientes están excluidos por la garantía legal de 24 meses:

1. Costos de sustitución y/o reparación de partes sujetas a uso habitual o costes para la manutención ordinaria del producto.
2. Costes y riesgos generados por el transporte del producto desde y hacia la tienda donde ha sido comprado o centro de asistencia técnica autorizado a recibir productos en garantía.
3. Causa por daños que derivan de una incorrecta instalación o uso impropio o no en conformidad con las instrucciones del manual.
4. Daños debidos a calamidades naturales, accidentales o condiciones adversas no compatibles con el producto.
5. Defectos que tienen un efecto desdéniable sobre las prestaciones del producto.

El productor, el distribuidor y todas las partes implicadas en la venta del producto no asumen alguna responsabilidad por pérdidas y daños económicos de cualquier malfuncionamiento del producto. Según la normativa vigente, el productor, el distribuidor y todas las partes implicadas en la venta no responden en ningún caso por daños, deformidades, incluidas las directas, indirectas, pérdida de renta neta, pérdida de ahorros y daños añadidos y otros detalles o consecuencias que exceden los daños causados de la violación de la garantía, contrato, responsabilidad objetiva, ilícita u otras causas que derivan de la utilización o imposibilidad de utilizar el producto y/o documentos de papel o electrónicos, incluida la falta de servicio.