



7052

Imported and distributed by  
**Anteprima Brands International Ltd,**  
1, Ferris Bldg, St. Luke Street, PTA1020,  
Gwardamangia, Malta - Europe  
[www.nuvitababy.com](http://www.nuvitababy.com)



EN1400



## IT SUCCHIETTO


### PER LA SICUREZZA DEL TUO BAMBINO. ATTENZIONE!

• Ispezionare attentamente prima di ogni utilizzo. Tirare il succhietto in tutte le direzioni. Gettare via ai primi segni di danno o debolezza. • Utilizzare solo catenelle o nastri porta-ciuccio testati secondo normativa EN12586. Non attaccare mai altri nastri o catenelle a un ciuccio, il bambino potrebbe strangolarsi. • Non lasciare il prodotto alla luce diretta del sole o vicino a una fonte di calore, né lasciare in soluzione disinfettante più a lungo di quanto raccomandato, poiché ciò potrebbe indebolire il succhietto. • Tenere il **Stericase** lontano dalla portata dei bambini per evitare il soffocamento.

### CONSIGLI PER LA PULIZIA, LA CONSERVAZIONE E L'USO

• Prima del primo utilizzo, mettere il ciuccio in acqua bollente per 5 minuti, lasciare raffreddare ed eliminare tutti i residui di acqua che possano essere rimasti intrappolati nel prodotto. Questo per garantire l'igiene. • Pulire prima di ogni utilizzo con sapone neutro e acqua calda. • **NON** usare candeggina, prodotti chimici aggressivi o lavastoviglie per pulire il prodotto. • Conservare in luogo asciutto assicurando che non rimanga acqua all'interno del prodotto. • Non immergere mai il succhietto in sostanze dolci o farmaci per evitare il rischio di carie. • Nel caso in cui il prodotto rimanga bloccato in bocca, **NON ENTRARE NEL PANICO**; non può essere ingerito ed è studiato per far fronte tale evento. Rimuovere dalla bocca con cura, il più delicatamente possibile. • Per motivi di sicurezza e igiene, sostituire il prodotto tra 1 e 2 mesi di utilizzo.

### STERICASE

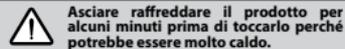

Il **Stericase** permette di sterilizzare il ciuccio nel forno a microonde, eliminando il 99,9% dei germi. • **Passaggio**

**1:** pulire con cura il ciuccio da sporco, cibo o oli. •

**Passaggio 2:** Riempire **SOLO** con acqua fino alla linea di livello sul retro del **Stericase** ed inserire il ciuccio.

• **Passaggio 3:** Mettere nel microonde in posizione verticale a 12 ml ogni lato a 750-1000W per 3 minuti. (Il livello dell'acqua, la potenza delle microonde e il tempo non corretti possono compromettere la sterilizzazione).

• **Passaggio 4:** Per motivi di sicurezza, lo **Stericase** si aprirà automaticamente alla fine del ciclo per rilasciare la pressione. Lasciare raffreddare il prodotto per alcuni minuti prima di toccarlo perché potrebbe essere molto caldo. • **Passaggio 5:** Eliminare l'eventuale acqua rimasta. **Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.**

